



Spruta för intraligamental lokalbedövning


BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING


REF 2013

SÅ HÄR LADDAR DU PAROJECT®-SPRUTAN


1. Ta isär sprutan i två delar: framstycke (cylinder) och bakstycke (med handtaget).

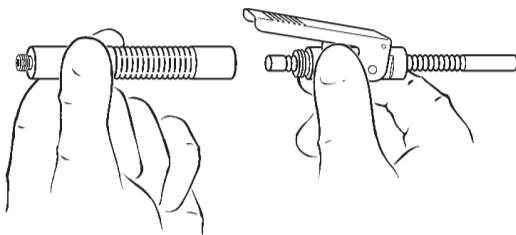


2. Ta bort kolvstången genom att dra ut den genom bakstycket.

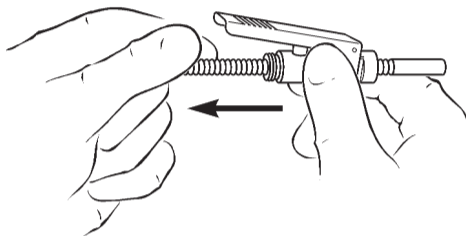


3. Skruva på en dental engångskanyl.

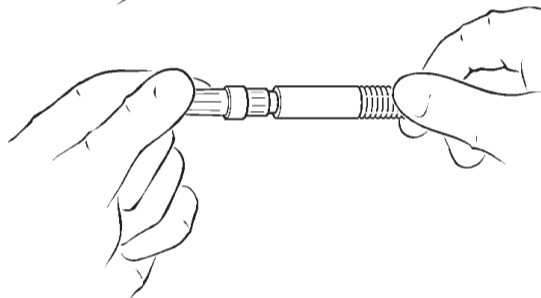


4. För in en standard ampull (1,8 ml) i cylindern.

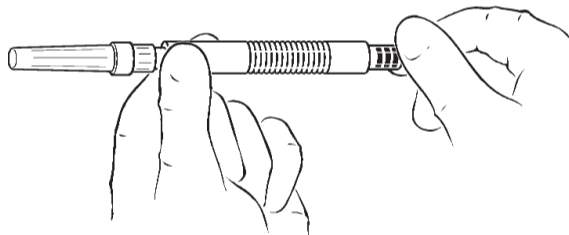

5. Sätt ihop sprutan igen genom att skruva fast cylindern på bakstycket.

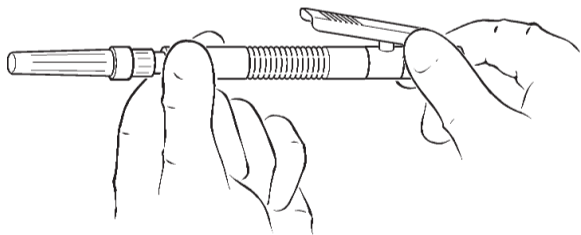

6. För in kolvstången genom bakstycket och tryck tills stången har kontakt med ampullen.
Kolvstången kan enbart införas bakifrån in i bakstycket och med den minsta, släta delen av kolvstången först.

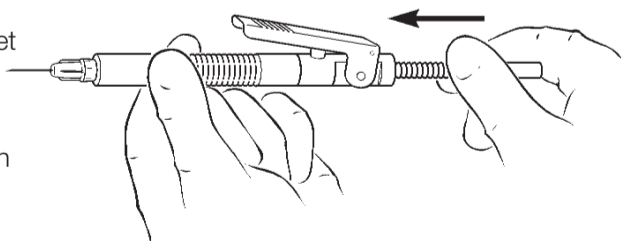

PAROJECT®-sprutan är nu laddad och klar att använda. Efter användningen skruvas först kanylen av innan den använda ampullen tas ur.

SKÖTSEL AV SPRUTAN

PAROJECT®-sprutan är framställd av högvärdigt rostfritt stål. Precis som alla instrument av rostfritt stål ska också den här sprutan rengöras och sköljas noga före sterilisering (anestesiösningar är mycket sura).

PAROJECT® levereras osteril och ska rengöras och steriliseras före den första användningen och efter varje användning.

Sterilisera i en ångautoklav vid 121 °C i minst 15 minuter eller vid 134 °C i minst 3 minuter.

GARANTI

PAROJECT® har 5 års garanti på material och konstruktion. Garantin täcker inte skador som beror på otillräcklig skötsel eller felaktigt handhavande.

