



ASPIJECT®


Selvaspirerende injeksjonssprøyte
for infiltrering og regionalanestesi

BRUKSANVISNING


BRUKSANVISNING

REF 2050 I 2051


1.
Skrue en standard dentalkanyle fast på sprøyten.

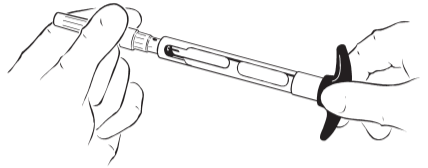


2.
For å unngå ikke-sentrert punktering av karpylens gummimembran (som kan føre til at det lekker væske fra karpyleen under injeksjonen), settes karpylens bakende inn først.

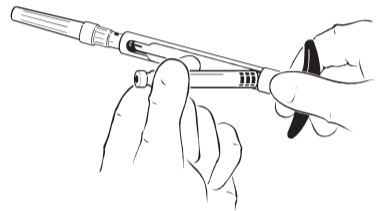


3.
Trykk karpyleen forover i sprøyten, slik at kanylen punkterer karpylens gummimembran – påse at kanylen punkterer membranen i midten.

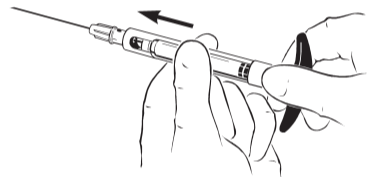

4.
«Passiv» aspirering oppnås ved et kort, lett trykk på stempelet. Dette gjør at den lille tapen på sprøytens base midlertidig deformerer karpylens gummimembran. Aspirering skjer når karpylens gummimembran går tilbake og da skaper et lett undertrykk i karpyleen. (Aspireringsfunksjonen avhenger av gummimembranens elastisitet, noe som er årsaken til at ikke alle karpyleer egner seg like godt for «passiv» aspirering).

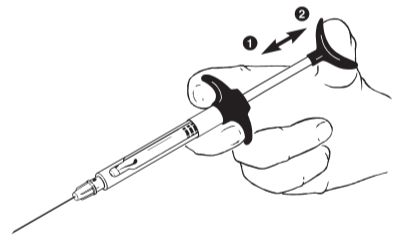

5.
Etter injeksjonen trykkes den brukte karpyleen bakover i sprøyten, deretter kan den fjernes enten ved å snu sprøyten så den åpne siden vender nedover eller ved å bruke en finger til å løfte karpyleen ut av sprøyten.

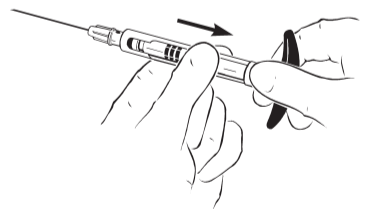

STELL AV SPRØYTEN

Som med alle instrumenter av rustfritt stål, skal sprøyten rengjøres grundig før den steriliseres (anestesiløsninger er meget sure).

Steriliseres i en dampautoklav ved 121 °C i minst 15 minutter eller ved 134 °C i minst 3 minutter.

GARANTI

ASPIJECT® har 5 års garanti. Skader på grunn av utilstrekkelig stell eller feilaktig bruk dekkes ikke av garantien.

