



ASPIJECT®

Zelfaspirerende injectiespuit voor
infiltratieanesthesie en zenuwblokking


INSTRUCTIES

INSTRUCTIES

REF 2050|2051


1.

Schroef een standaardnaald voor tandheelkundig gebruik op de injectiespuit.

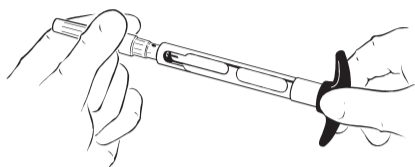


2.

Plaats eerst de achterkant van de patroon in de injectiespuit. Zo wordt voorkomen dat het rubberen membraan van de patroon door verkeerde uitlijning niet in het midden wordt doorgeprikt, wat zou kunnen leiden tot lekkage van de injectievloeistof uit de patroon tijdens het toedienen.

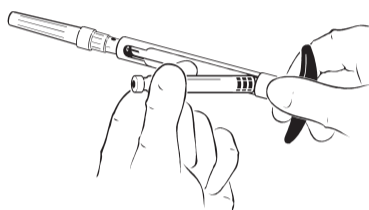

3.

Duw de patroon naar voren in de spuit, zodat de naald het rubberen membraan van de patroon doorboort. Het membraan moet daarbij centraal worden doorgeprikt.

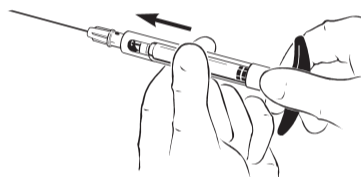


4.

Druk de zuiger kort in voor 'passieve' aspiratie. Het rubberen membraan van de patroon vervormt daarbij tijdelijk door de kleine naaf aan de basis van de spuit.


Als het rubberen membraan van de patroon terugveert, ontstaat er een lichte negatieve druk in de patroon en treedt er aspiratie op.

(De aspiratiefunctie hangt af van de elasticiteit van de rubberen membraan, daarom zijn niet alle patronen even geschikt voor 'passieve' aspiratie.)

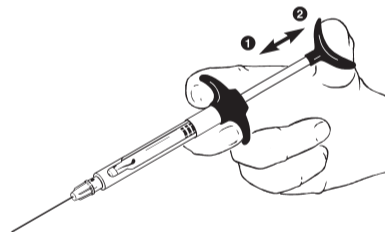

5.

Schuif de gebruikte patroon na de injectie in de spuit naar achteren en verwijder hem door de spuit met de opening naar beneden te houden of door de patroon met een vinger uit de spuit te tillen.

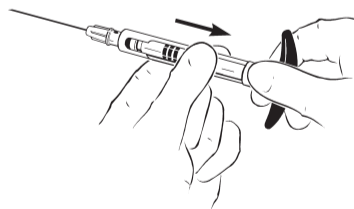

ONDERHOUD VAN DE INJECTIESPUIT

Zoals alle instrumenten van roestvrij staal moet de injectiespuit eerst grondig worden gereinigd alvorens deze te steriliseren (anesthetische vloeistoffen bezitten agressieve eigenschappen).

Steriliseer in een stoomsterilisatie-autoclaaf op 121 °C gedurende minimaal 15 minuten of op 134 °C gedurende minimaal 3 minuten.

GARANTIE

ASPIJECT® heeft een garantie van 5 jaar. Bij nalatig onderhoud of verkeerd gebruik vervalt de garantie.

