



# ASPIJECT®


Seringă de injectare cu autoaspirație  
pentru infiltrații și anestezii de blocare

## INSTRUCȚIUNI DE OPERARE


### INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

REF 2050|2051


1.  
Înșurubați un ac dentar standard pe seringă.

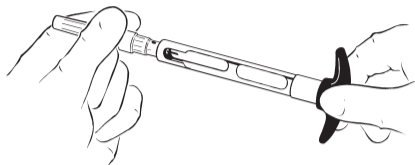


2.  
Pentru a evita perforarea membranei de cauciuc a cartușului aliniat greșit (necentrat) (ceea ce ar putea cauza scurgerea fluidului din cartuș în timpul injectiei), introduceți mai întâi capătul posterior al cartușului.

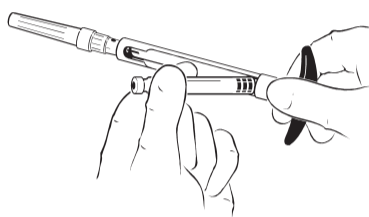


3.  
Împingeți cartușul înainte în seringă astfel încât acul să perforzeze membrana de cauciuc din cartuș – asigurându-vă că acul penetrează membrana în centru.

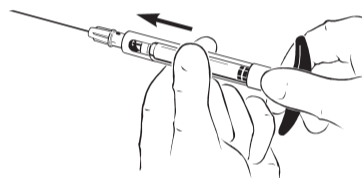

4.  
Aspirația "pasivă" se obține prin apăsarea scurtă a pistonului, determinând o deformare temporară a membranei de cauciuc a cartușului prin butucul mic de la baza seringii. Aspirația apare atunci când membrana de cauciuc a cartușului sare înapoi creând o presiune negativă ușoară în cartuș. (Funcția de aspirație este dependentă de elasticitatea membranei de cauciuc și din acest motiv nu toate cartușele sunt la fel de potrivite pentru aspirația "pasivă").

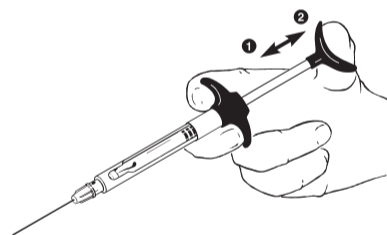

5.  
După injecție, împingeți cartușul uzat înapoi în seringă, după care el poate fi îndepărtat fie prin rotirea seringii cu fața sa deschisă în jos sau prin utilizarea unui deget pentru a scoate cartușul din seringă.

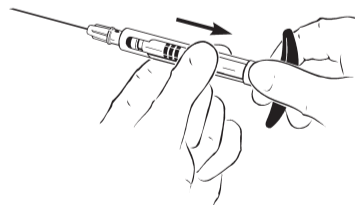

### ÎNTREȚINEREA SERINGII

Ca toate instrumentele din oțel inoxidabil, seringă trebuie curățată cu grijă înainte de sterilizare (soluțiile anestezice sunt intens acide).

Sterilizeaza intr-un autoclav de sterilizare cu abur la 121°C pentru minim 15 minute sau la 134°C pentru 3 minute.

### GARANȚIE

Seringa ASPIJECT® este garantată timp de 5 ani. Defectele datorate întreținerii neadecvate sau manipulării incorecte nu sunt acoperite de garanție.

