




Selbstaspirierendes steriles Injektionssystem

GEBRAUCHSANWEISUNG


GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Nadel anbringen

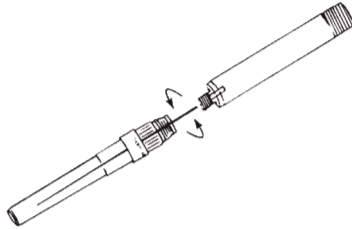


Der nicht sterile Assistent schraubt eine Standard-Dentalnadel auf, während der sterile Operateur/Assistent den Zylinder festhält.

2. Compule einlegen

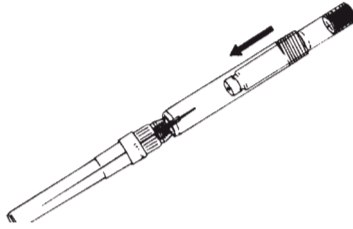


Der nicht sterile Assistent legt eine Standard-Compule ein, während der sterile Operateur/Assistent den Zylinder festhält.

3. Zylinder auf den sterilen Fingergriff schrauben

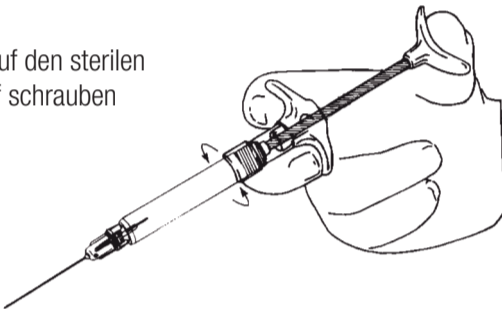

Der sterile Operateur/Assistent schraubt den gefüllten Zylinder auf den (sterilisierten) ASPIJECT® SIS Fingergriff. Der nicht sterile Assistent entfernt die Nadelkappe.

4. Die Aspiration wird durch leichtes Hochziehen und Niederdrücken des Spritzenstempels erreicht

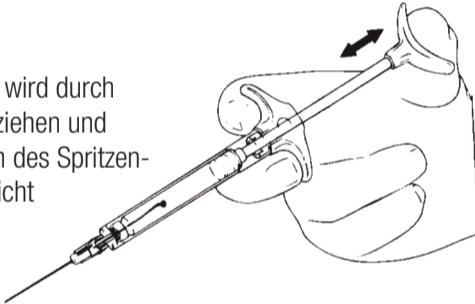

Durch das elastische Zurückfedern der Compulenmembran, die zuerst auf eine Ausbuchtung an der Zylinderbasis gedrückt wird, entsteht ein Unterdruck in der Compule, der die Aspiration bewirkt.

PFLEGE DER SPRITZE

Der ASPIJECT® SIS Fingergriff besteht aus hochwertigem (säurebeständigen) Edelstahl und technischem Thermoplast.

REINIGUNG

Wasser und Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung. Es wird empfohlen, Fingergriff und Zylinder vor der Sterilisation sorgfältig zu reinigen und zu spülen.

STERILISATION

Die Spritze mit Hilfe eines beliebigen Verfahrens autoklavieren (max. 200 °C/392 F). Zylinder und Fingergriff voneinander getrennt sterilisieren (wird die Spritze als Ganzes sterilisiert, kann die thermische Ausdehnung des Kunststoffes zu Spannungen führen, die den Zylinder beschädigen können, wenn dieser abgeschraubt wird).

ZYLINDER

ASPIJECT® SIS wird mit einem Compulenzylinder geliefert. Zusätzliche Zylinder sind als 3er-Packs erhältlich. Den Zylinder mit Hilfe eines beliebigen Verfahrens autoklavieren (max. 135 °C/275 F).

GARANTIE

Die Garantiedauer von ASPIJECT® SIS beträgt 5 Jahre. Der Zylinder ist von der Garantie ausgenommen. Schäden, die durch mangelnde Pflege oder falsche Handhabung entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

HERSTELLER

RØNVIG Dental Mfg. A/S · Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Dagaard · Dänemark
Tel.: +45 70 23 34 11 · Fax: +45 76 74 07 98
E-mail: export@ronvig.com · www.ronvig.com

