




# DENTO-PREP™

## DUST-CABINET

### GEBRUIKSAANWIJZING

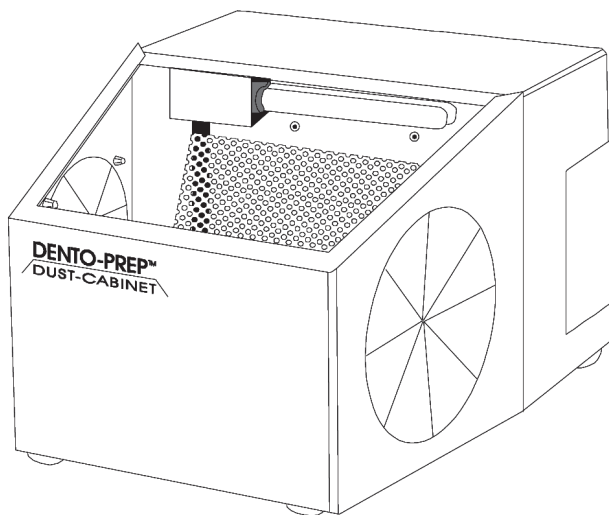

**REF** 1903: 230 VAC/50-60 Hz 30 W

#### Gebruiksaanwijzing

DENTO-PREP™ DUST-CABINET is bedoeld voor poederstralen met DENTO-PREP™. Het gebruik van het kabinet voor andere doeleinden is voor eigen verantwoordelijkheid van de behandelaar.

#### Vorbereiding

Monteer de bijgeleverde lamp aan, sluit het netsnoer aan en uw DUST-CABINET is klaar voor gebruik. Het raampje in de DUST-CABINET kan worden verwijderd door het naar boven te duwen/schuiven.

#### Onderhoud

Wij raden u aan om uw DUST-CABINET regelmatig schoon te houden. Verwijder het raampje en zuig het gebruikte poeder op. De DUST-CABINET is uitgerust met een stoffilter waarmee het ingebouwde elektronische zuigsysteem wordt beschermd tegen het poeder dat in de kast wordt geblazen. Het filter moet regelmatig worden verwijderd en schoongemaakt (stofzuigen). Verwijder het filter door het kleine luikje aan de zijkant van de kast.

#### Foutoplossing

Geen licht = Vervang de lamp  
Licht en zuigfunctie werken niet = Vervang de zekering  
Zuigfunctie is verminderd = Maak het filter schoon

#### Technische informatie

Afmetingen: H 180 – B 225 – D 315  
Gewicht: 4130 gram  
Elektrische aansluiting: Artikelnr.1903: 230 VAC/50-60 Hz 30 W  
Lamp: PL-S 4P 9W 600 lumen, 840  
Zekering: 1AT  
Materiaal: Kast: poedergecoat staal  
Raampje: Gehard glas



RØNVIG Dental Mfg. A/S  
Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Daugaard · Denemarken  
Tel.: +45 70 23 34 11 · Fax: +45 76 74 07 98  
E-mail: export@ronvig.com · www.ronvig.com

