




DENTO-PREP™

DUST-CABINET

KASUTUSJUHEND

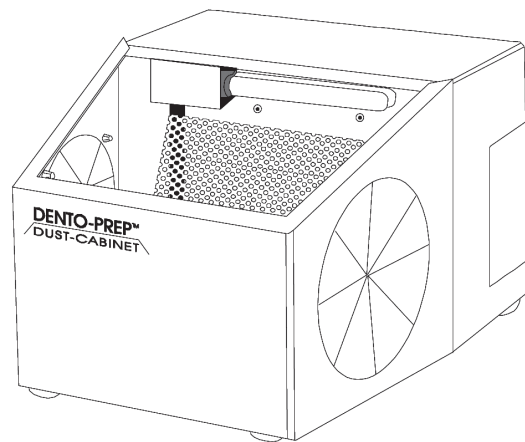

REF 1903: 230 VAC/50-60 Hz 30 W

Kavandatud kasutus

DENTO-PREP™ DUST-CABINET on mõeldud DENTO-PREP™-i pulberpitsimisprotseduuride ajal kasutamiseks. Kapi võimalik kasutamine muudel eesmärkidel toimub töötaja enda vastutusel.

Ettevalmistus

Sisestage kaasasolev lamp, kinnitage toitejuhe ja DUST-CABINET on kasutusvalmis. DUST-CABINET akent saab eemaldada, lükates/libistades seda ülespoole.

Hooldus

DUST-CABINET on soovitatav korrapäraselt puhastada – eemaldada aken ja imeda välja kasutatud pulber.

DUST-CABINET on varustatud tolmufiltriga, mis kaitseb sisseehitatud elektroonilist imemissüsteemi korpusesse puhutud pulbri eest. Filtrit tuleb regulaarselt välja võtta ja puhastada (tolmuimejaga). Eemaldage filter läbi väikese luugi, mis asub korpuse küljel.

Veotsing

Tuli ei põle = vahetage lamp
Valgus ja imemine ei tööta = vahetage kaitse
Imemise vähenemine = puhastage filter

Tehniline informatsioon

Mõõdud: H 180 – W 225 – D 315
Kaal: 4130 grammi
Võimsus: ese nr 1903: 230 VAC/50–60 Hz 30 W
Lamp: PL-S 4P 9W 600 luumenit, 840
Kaitse: 1AT
Materjal: Kapp: pulbervärvitud karastatud teras
Aken: klaas

