



ASPIJECT®

Active

Injektionsspritze für die Infiltrations- und Leitungsanästhesie mit aktiver Aspiration

GEBRAUCHSANLEITUNG


GEBRAUCHSANLEITUNG

REF 2070


- 1 Die Spiralhaken am Spritzenkolben sind sehr scharf. Um Verletzungen vorzubeugen, den Kolben so weit zurückziehen, bis die Haken in den hinteren Abschnitt der Spritze gleiten.



- 2 Die Spiralhaken sollten nun nicht mehr sichtbar sein. Um Schnittverletzungen am Finger zu vermeiden, die Haken in dieser Position belassen.

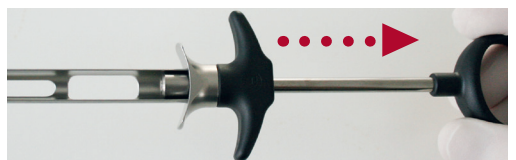

- 3 Eine herkömmliche Dentalkanüle aufschrauben.

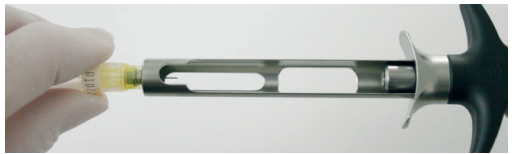

- 4 Den Spritzenkolben noch weiter zurückziehen, bis die Federhalterung vollständig in den hinteren Abschnitt der Spritze gleitet. Die Ampulle mit dem hinteren Ende voraus einlegen.



- 5 Den Kolben um eine halbe Drehung im Uhrzeigersinn drehen, um die Spiralhaken und den Gummistopfen an der Ampulle miteinander zu verbinden.



- 6 Die aktive Aspiration erfolgt durch Zurückziehen des Spritzenkolbens.



- 7 Die Kanüle nach der Injektion abschrauben, den Spritzenkolben vollständig zurückziehen und die Ampulle zum Entfernen in die freie Hand fallen lassen.



SPRITZENPFLEGE

Vor der Sterilisation ist die Spritze wie bei Instrumenten aus Edelstahl üblich zunächst gründlich zu reinigen (anästhetische Lösungen sind stark sauer). Zu sterilisieren in einem Dampfsterilisator / Autoclav bei 121°C in 15 Minuten, oder bei 134°C in 3 Minuten.

GARANTIE

Die Garantie für die Injektionsspritze ASPIJECT® beträgt fünf Jahre. Schäden aufgrund von unsachgemäßer Pflege oder falschem Gebrauch sind von der Garantie ausgeschlossen.

