



Injektionsspritze für die intraligamentäre Lokalanästhesie


GEBRAUCHSANLEITUNG

GEBRAUCHSANLEITUNG


REF 2013

PAROJECT®-SPRITZE LADEN


1. Zerlegen Sie die Spritze in zwei Teile: vorne (Zylinder) und hinten (Hebelgehäuse).

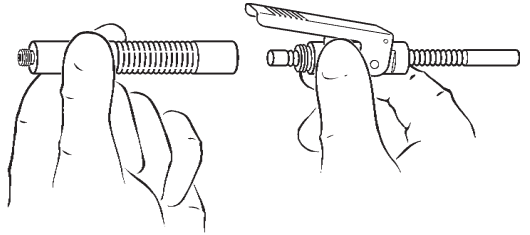


2. Entfernen Sie den Kolben, indem Sie ihn durch das „Hebelgehäuse“ ziehen.

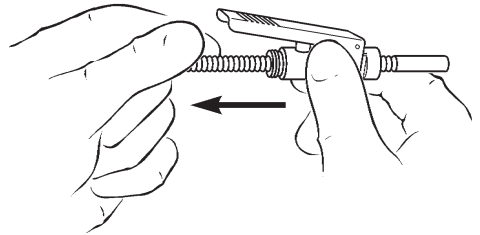


3. Einweg-Injektionskanüle anschrauben.

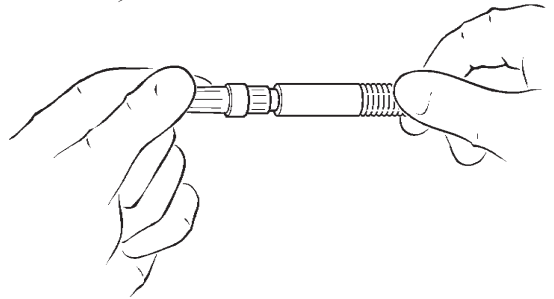


4. Standard 1,8 ml Zylinderampulle in den vorderen Zylinder einführen.

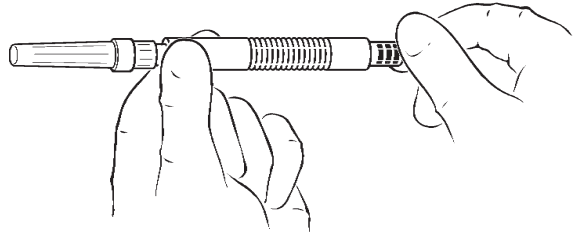

5. Setzen Sie die Spritze wieder zusammen, indem Sie den „Zylinder“ auf das „Hebelgehäuse“ schrauben.

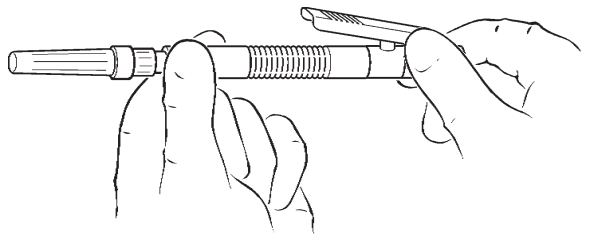

6. Setzen Sie den Kolben in das „Hebelgehäuse“ ein und drücken Sie mehrmals auf den Hebel, bis die Zylinderampulle berührt wird. Der Kolben kann nur von der Rückseite des „Hebelgehäuses“ eingeführt werden, wobei der kleinste, glatte Teil des Kolbens zuerst in das „Hebelgehäuse“ hineinragt.

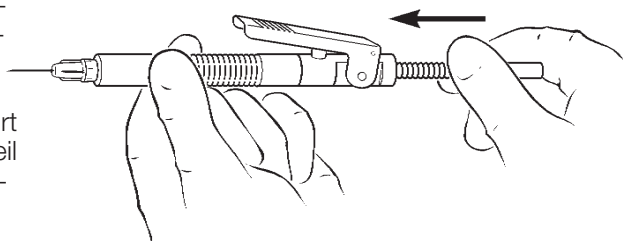

Die PAROJECT®-Spritze ist nun geladen und einsatzbereit. Schrauben Sie nach dem Gebrauch die Injektionsnadel ab, bevor Sie die gebrauchte Zylinderampulle entnehmen.

PFLEGE DER SPRITZE

Die PAROJECT®-Spritze besteht aus hochwertigem Edelstahl. Wie bei allen Edelstahlinstrumenten sollte die Spritze vor der Sterilisation gereinigt und sorgfältig gespült werden (Anästhesielösungen sind stark sauer).

PAROJECT® wird unsteril geliefert und sollte vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch gereinigt und sterilisiert werden.

Sterilisieren Sie es in einem Dampfsterilisator für 15 Minuten bei 121°C oder für 3 Minuten bei 134°C.

GARANTIE

PAROJECT® hat eine Garantie von 5 Jahren. Schäden, die auf ungenügende Pflege oder falsche Handhabung zurückzuführen sind, werden von der Garantie nicht abgedeckt.

