



Injectiespuit voor intraligamentaire anesthesie


GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIKSAANWIJZING


REF 2013

VOORBEREIDING – HET GEREEDMAKEN VAN DE PAROJECT®


1. Neem de spuit uit elkaar in twee delen: Voorstuk (cilinder) en achterstuk (hefboomhuis).

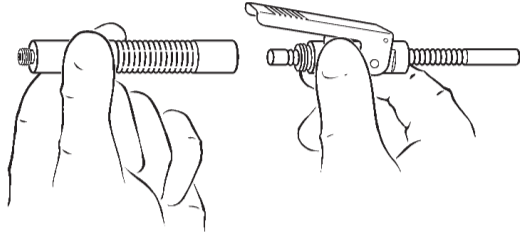


2. Verwijder de zuiger door de zuiger door het omhulsel te trekken.

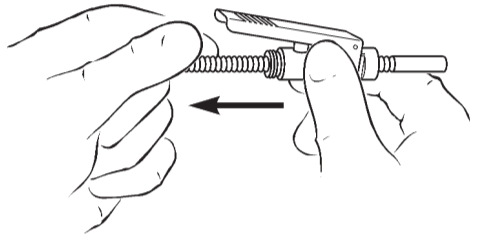


3. Schroef de disposable dentale naald erop

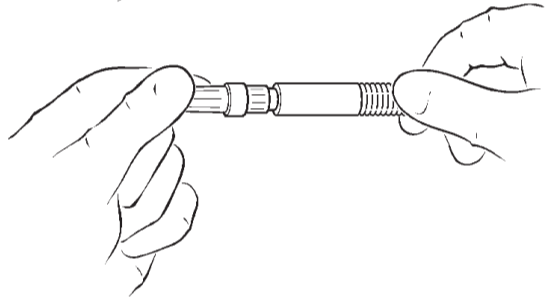


4. Breng een standaard carpule (1,8 ml) in de cilinder (voorstuk).

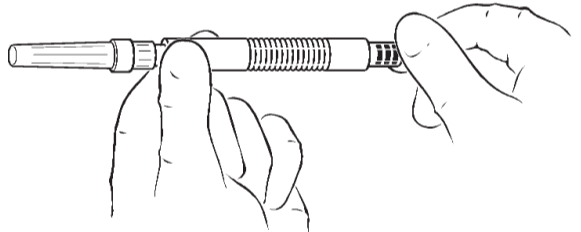

5. Zet de injectiespuit weer in elkaar. Draai de cilinder weer op het hefboomhuis.

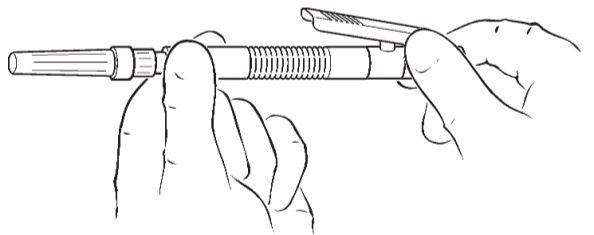

6. Steek de plunger in het hefboomhuis en druk die aan door middel van de hefboom totdat deze op de carpule stuit.

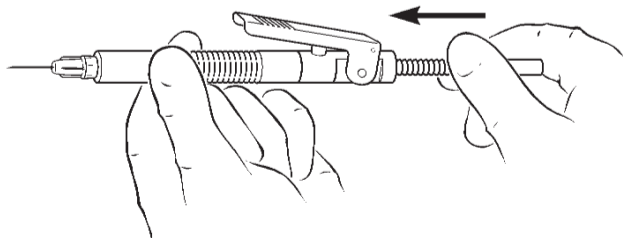

De plunger kan alleen vanaf de achterkant worden ingebracht, waarbij eerst het kleinste, gladde gedeelte wordt ingebracht.

De Paroject® is nu klaar voor gebruik. Na gebruik de naald losschroeven, alvorens de gebruikte carpule te verwijderen.

ONDERHOUD EN STERILISATIE

De Paroject® injectiespuit is vervaardigd van hoogwaardig roestvrijstaal. Het is belangrijk de Paroject® voor sterilisatie zorgvuldig te reinigen en af te spoelen. PAROJECT® worden niet-steriel geleverd en moeten vóór het eerste gebruik worden gesteriliseerd. Steriliseer het in een stoomsterilisatie autoclaaf bij 121 °C gedurende 15 minuten of bij 134 °C gedurende 3 minuten.

GARANTIE

De PAROJECT® injectiespuit heeft een garantie periode van 5 jaar. Bij nalatig onderhoud, of verkeerd gebruik vervalt de garantie.

