



# Instrumente für Injektion



## ASPIJECT® SIS STERILE INJECTION SYSTEM

Injektionsspritze für die Leitungs-  
und Infiltrationsanästhesie. Art.-Nr. 2085

Vollkommene Sterilität bei operativen Eingriffen unter Verwendung von Standardampullen und Kanülen. Die Alternative zu Einmalspritzen, mit denen die einhändige Aspiration schwierig ist.

### Aspirationsprinzip

Beim Druck auf den Kolben dehnt sich die Gummimembrane der Ampulle nach innen. Bei einer Verminderung des Drucks auf dem Kolben bewegt sich die Membrane zurück und verursacht so ein Vakuum innerhalb der Ampulle, das die Aspiration ausreichend ist.

- aus hochgradigem rostfreien Edelstahl und Hightech Polymer
- für jede Sterilisationsart geeignet
- selbstaspirierend. Die Aspiration entsteht automatisch durch Lösen des Druckes auf den Spritzenstempel bzw. auf die Daumenscheibe. Die Aspiration ohne Zug (Haken) minimiert das Risiko für Kanülenbewegungen im Gewebe
- verfügt über komfortable Handlichkeit und Aspirationsprinzip wie ASPIJECT®
- die Sterilität ist durch Einschluss der unsterilen Zylinderampulle in der autoklavierbaren, transparenten Schraubhülse gewährleistet
- 5 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung (ohne Hülsen)



1. Die nicht-sterilen Assistenten Schrauben eine dentale Nadel auf und Einführen eine Zylinderampulle während die sterile Chirurg / Assistent hält den sterilisierten Schraubhülse
2. Die sterile Chirurgen / Sek Schrauben die Ampulle an sterilisiert Fingergriff
3. Das nicht-sterile Assistent entfernt die Nadelkappe



Hersteller:



Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Dagaard · Danmark  
Tel.: (+45) 70 23 34 11 · Fax: (+45) 76 74 07 98  
e-mail: export@ronvig.com · www.ronvig.com