

# Instrumente für Injektion




## ASPIJECT®

Injektionsspritze für die Leitungs-  
und Infiltrationsanästhesie Art.-Nr. 2050

ASPIJECT® ist eine ausbalancierte, komfortabel in der Hand liegende Injektionsspritze mit ausgezeichneter Taktilität, sowie einem zuverlässigen Aspirationssystem.

- selbstaspirierend. Die Aspiration entsteht automatisch durch Lösen des Druckes auf den Spritzenstempel bzw. auf die Daumenscheibe. Die Aspiration ohne Zug (Haken) minimiert das Risiko für Kanülenbewegungen im Gewebe.
- aus hochgradigem rostfreien Edelstahl und Hightech Polymer
- für jede Sterilisationsart geeignet
- bequemes seitliches Einlegen der Ampulle
- hygienisch durch glatte und ebene Flächen
- für den Gebrauch mit handelsüblichen Zylinderampullen und Kanülen geeignet
- 5 Jahre Herstellergarantie auf Material und Verarbeitung

## ASPIJECT®

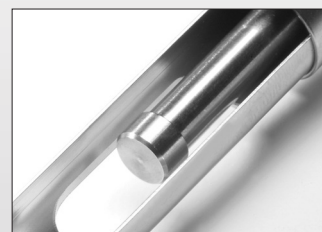

### Aspirationsprinzip

Beim Druck auf den Kolben dehnt sich die Gummimembrane der Ampulle nach innen. Bei einer Verminderung des Drucks auf dem Kolben bewegt sich die Membrane zurück und verursacht so ein Vakuum innerhalb der Ampulle, das die Aspiration ausreichend ist.



Hersteller:



**RÖNVIG**  
Dental Mfg. A/S

Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Daugaard · Danmark  
Tel.: (+45) 70 23 34 11 · Fax: (+45) 76 74 07 98  
e-mail: export@ronvig.com · www.ronvig.com